

ИНСТРУКЦИЯ

Сборная (передняя+задняя) поддержка для собак малых, средних и крупных пород.

Описание.

Поддержка сборная для грудных и тазовых конечностей предназначена:

- для восстановления двигательной активности в реабилитационный период животных, перенёсших травму позвоночника;
- при парезах и параличах конечностей;
- при спондилезах и остеохондрозах;
- при мышечной дистрофии конечностей;
- при патологиях суставного аппарата;
- для поддержания конечностей и позвоночного столба животного в анатомически-правильном положении;
- для помощи владельцу при выполнении таких манипуляций с животным, как поддержка, прогулка, посадка в автомобиль и т.д.

Рекомендовано к использованию животным перенёсшим ампутацию конечности.

Ускоряет реабилитацию, обеспечивает возможность прогулки.

Благодаря двум ручкам и особой конструкции, нагрузка при использовании поддержки распределяется равномерно, что обеспечивает минимальную патологическую подвижность позвоночника в грудном, поясничном и крестцовом отделах.

Поддержка состоит из четырех основных частей: верхней детали грудного отдела позвоночника, верхней детали крестцового отдела позвоночника, нижней детали живота и нижней детали груди, соединяющихся между собой регулируемыми застежками «фастекс». В комплект входят два вида длинных ручек, оснащённых ремнями: на две точки опоры для поддержания туловища животного в грудном и крестцовом отделах позвоночника и на четыре точки опоры для поддержания животного только в крестцовом отделе позвоночника. Верхние детали грудного и крестцового отделов поддержки снабжены короткими ручками для вспомогательных манипуляций при движении животного. На верхних и нижних деталях изделия имеется маркировка (шея/хвост) для определения правильного положения детали на животном.

Размеры.

Определяются по весу и обхватам животного.

- Р-р 1. 10-25 кг. Обхват груди 50 — 64 см, обхват талии 44 — 56 см,
- р-р 2. 20-35 кг. Обхват груди 64 — 76 см, обхват талии 60 — 72 см,
- р-р 3. 30-45кг. Обхват груди 68 — 80 см, обхват талии 66 — 78 см,
- р-р 4. 40-55кг. Обхват груди 78 — 90 см, обхват талии 70 — 82 см,
- р-р 5. 50+ кг. Обхват груди 82 — 100 см, обхват талии 72 — 86 см,

Подготовка к применению.

Для того, чтобы поддержка полностью выполняла свои функции, перед применением необходимо обеспечить правильную посадку изделия на теле животного.

Для этого необходимо:

- Надеть поддержку на собаку.
- Плотно затянуть регулирующие ремни.
- Симметрично распределить регулировку ремнями относительно правой и левой стороны изделия. При положении на животном расстояние между деталями спинки и живота/груди должно быть одинаковым относительно линии позвоночника.

Поддержка должна плотно сидеть на животном, но при этом не сдавливать грудную клетку и живот.

Для предотвращения самопроизвольного растягивания защелки «фастекс» необходимо убедиться, что при соединении деталей фастекса произошёл щелчок.

Как правильно надевать и снимать поддержку.

Надевать:

- Соединить фастексами верхнюю деталь грудного отдела (с широкой стороны) с нижней деталью груди сзади локтевого сустава передней лапы с правой (или левой) стороны.

- Наложить изделие на животное.
- Соединить симметричные фастексы с левой (или правой) стороны.
- Соединить фастексы, находящиеся в районе шеи животного (на деталях имеется бирка с соответствующим обозначением), проведя по груди между передними лапами соответствующие части нижней детали.
- Соединить фастексами верхнюю деталь крестцового отдела (с широкой стороны) с нижней деталью живота в районе талии с правой (или левой) стороны.
- Наложить изделие на животное.
- Соединить фастексы, находящиеся в районе хвоста животного (на деталях имеется бирка с соответствующим обозначением), проведя по животу между задними лапами соответствующие части нижней детали (более длинные и узкие, образующие V).
- Соединить фастексом детали спинки грудного и крестцового отделов.
- Соединить фастексом детали грудной части и живота.
- Проверить посадку изделия на животном.
- При необходимости пристегнуть вспомогательные ремни карабинами к верхней части детали за полукольца, расположенные около фастексов и на ручке изделия.

Снимать:

- Прodelать вышеперечисленные действия в обратном порядке.

В комплекте:

1. верхняя деталь грудного отдела,
2. верхняя деталь крестцового отдела,
3. нижняя деталь живота,
4. нижняя деталь груди,
5. ремень для поддержания крестцового отдела (на четыре точки опоры),
6. ремень для поддержания животного (на две точки опоры),
7. инструкция по применению.

Уход за изделием.



Материалы.

Материал верха — оксфорд (100% пэ). Материал подкладки — неопрен.(100% пэ, синтетический каучук.)

Страна производитель: Россия.

Производитель.

ООО «ВЕДА-МОДА».

Юридический адрес: Московская обл., г. Протвино, ул. Заводской проезд, д. 22.

Тел. 8(4967)31-14-26

e-mail: moda@vedaved.ru

Продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

ИНСТРУКЦИЯ

Полная поддержка для собак малых, средних и крупных пород.

Описание.

Поддержка полная для корпуса животного - грудных и тазовых конечностей предназначена:

- для восстановления двигательной активности в реабилитационный период животных, перенёсших травму позвоночника;
- при парезах и параличах конечностей;
- при спондилезах и остеохондрозах;
- при патологиях суставного аппарата;
- для поддержания конечностей и позвоночного столба животного в анатомически-правильном положении;
- для помощи владельцу при выполнении таких манипуляций с животным, как поддержка, прогулка, посадка в автомобиль и т.д.

Рекомендовано к использованию животным перенёсшим ампутацию конечности.

Ускоряет реабилитацию, обеспечивает возможность прогулки.

Благодаря двум ручкам и особой конструкции, нагрузка при использовании поддержки распределяется равномерно по позвоночному столбу животного, что обеспечивает минимальную патологическую подвижность позвоночника в грудном, поясничном и крестцовом отделах.

Поддержка состоит из трех основных частей: верхней детали грудного отдела позвоночника, верхней детали крестцового отдела позвоночника и нижней детали, соединяющихся между собой регулируемыми застежками «фастекс». В комплекте с полной поддержкой прилагается два вида длинных ручек, оснащённых ремнями: на две точки опоры для поддержания туловища животного в грудном и крестцовом отделах и на четыре точки опоры для поддержания животного только в крестцовом отделе позвоночника. Верхние детали грудного и крестцового отделов поддержки снабжены короткими ручками для вспомогательных манипуляций при движении животного. На верхних и нижних деталях изделия имеется маркировка («шея/хвост») для определения правильного положения детали на животном.

Размеры.

Определяются по весу и обхватам животного.

- Р-р 1. 10-25 кг. Обхват груди 50 — 64 см, обхват талии 44 — 56 см,
- р-р 2. 20-35 кг. Обхват груди 64 — 76 см, обхват талии 60 — 72 см, расстояние между лапами сбоку 26 — 32 см.
- р-р 3. 30-45 кг. Обхват груди 68 — 80 см, обхват талии 66 — 78 см, расстояние между лапами сбоку 26 — 32 см.
- р-р 4. 40-55 кг. Обхват груди 78 — 90 см, обхват талии 70 — 82 см, расстояние между лапами сбоку 27 — 33 см.
- р-р 5. 50+ кг. Обхват груди 82 — 100 см, обхват талии 72 — 86 см, расстояние между лапами сбоку 37 — 43 см.

Подготовка к применению.

Для того, чтобы поддержка полностью выполняла свои функции, перед применением необходимо обеспечить правильную посадку изделия на теле животного.

Для этого необходимо:

- Надеть поддержку на собаку.
- Плотно затянуть регулирующие ремни.
- Симметрично распределить регулировку ремнями относительно правой и левой стороны изделия. При положении на животном расстояние между верхними деталями и нижней деталью должно быть одинаковым относительно линии позвоночника.

Поддержка должна плотно сидеть на животном, но при этом не сдавливать грудную клетку и живот.

Для предотвращения самопроизвольного расстегивания защелки «фастекс» необходимо убедиться, что при соединении деталей фастекса произошел щелчок.

Как правильно надевать и снимать поддержку.

Надевать:

- Соединить фастексами детали верхних частей грудного и крестцового отдела (с широкой стороны) с деталью нижней части сзади локтевого сустава и впереди бедра с правой (или левой) стороны.
- Наложить изделие на животное.
- Соединить симметричные фастексы с левой (или правой) стороны.
- Соединить фастексы, находящиеся в районе шеи животного (на деталях имеется бирка с соответствующим обозначением), проведя по груди между передними лапами соответствующие части нижней детали.
- Соединить фастексы, находящиеся в районе хвоста животного (на деталях имеется бирка с соответствующим обозначением), проведя по животу между задними лапами соответствующие части нижней детали (более длинные и узкие, образующие V).
- Соединить фастексом верхние детали грудного и крестцового отделов.
- Проверить посадку изделия на животном.
- При необходимости пристегнуть вспомогательные ремни карабинами к верхним деталям за полукольца, расположенные около фастексов и на ручке изделия.

Снимать:

- Прodelать вышеперечисленные действия в обратном порядке.

В комплекте:

1. верхняя деталь грудного отдела,
2. верхняя деталь крестцового отдела,
3. нижняя деталь изделия,
4. ремень для поддержания крестцового отдела позвоночника (на четыре точки опоры),
5. ремень для поддержания туловища животного (на две точки опоры),
6. инструкция по применению.

Уход за изделием.



Материалы.

Материал верха — оксфорд (100% пэ). Материал подкладки — неопрен.(100% пэ, синтетический каучук.)

Страна производитель: Россия.

Производитель.

ООО «ВЕДА-МОДА».

Юридический адрес: Московская обл., г. Протвино, ул. Заводской проезд, д. 22.

Тел. 8(4967)31-14-26

e-mail: moda@vedaved.ru

Продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

ИНСТРУКЦИЯ

Передняя поддержка для собак малых, средних и крупных пород.

Описание.

Поддержка передняя для грудных конечностей предназначена:

- для восстановления двигательной активности в реабилитационный период животных, перенёсших травму позвоночника;
- при парезах и параличах конечностей;
- при спондилезах и остеохондрозах;
- при патологиях суставного аппарата;
- для поддержания грудных конечностей и позвоночного столба животного в анатомически правильном положении;
- для помощи владельцу при выполнении таких манипуляций с животным, как поддержка, прогулка, посадка в автомобиль и т.д.

Рекомендовано к использованию животным перенёсшим ампутацию конечности.

Ускоряет реабилитацию, обеспечивает возможность прогулки.

Благодаря ручке и особой конструкции, нагрузка при использовании поддержки распределяется равномерно по позвоночному столбу животного, что обеспечивает минимальную патологическую подвижность позвоночного столба в грудно-поясничном отделе.

Поддержка состоит из двух основных частей: верхней детали грудного отдела позвоночника и нижней детали грудины, соединяющихся между собой регулируемыми застежками «фастекс». Поддержка снабжена короткой ручкой для помощи животному при движении. На верхней и нижней деталях имеется маркировка («шея») для определения правильного положения детали на теле животного.

Размеры.

Определяются по весу и обхватам животного.

- Р-р **1.** 10-25 кг. Обхват талии 44 — 56 см,
- р-р **2.** 20-35 кг. Обхват груди 64 — 76 см,
- р-р **3.** 30-45 кг. Обхват груди 68 — 80 см,
- р-р **4.** 40-55 кг. Обхват груди 78 — 90 см,
- р-р **5.** 50+кг. Обхват груди 82 — 100 см.

Подготовка к применению.

Для того чтобы поддержка полностью выполняла свои функции, перед применением необходимо обеспечить правильную посадку изделия на теле животного.

Для этого необходимо:

- Надеть поддержку на собаку.
- Плотно затянуть регулирующие ремни.
- Симметрично распределить регулировку ремнями относительно правой и левой стороны изделия. При положении на животном расстояние между деталями спинки и груди должно быть одинаково относительно линии позвоночника.

Поддержка должна плотно сидеть на животном, но при этом не сдавливать грудную клетку и живот.

Для предотвращения самопроизвольного расстегивания защёлки «фастекс» необходимо убедиться, что при соединении деталей фастекса произошёл щелчок.

Как правильно надевать и снимать поддержку.

Надевать:

- Соединить фастексами верхние детали грудного отдела (с широкой стороны) с нижней деталью груди за локтевым суставом передней лапы с правой (или левой) стороны.
- Наложить изделие на животное.
- Соединить симметричные фастексы с левой (или правой) стороны.

- Соединить фастексы, находящиеся в районе шеи животного (на деталях имеется бирка с соответствующим обозначением), проведя по груди между передними лапами соответствующие части нижней детали.
- *Проверить посадку изделия на животном.*

Снимать:

- Прodelать вышеперечисленные действия в обратном порядке.

В комплекте:

1. верхняя деталь грудного отдела,
2. нижняя деталь груди,
3. инструкция по применению.

Уход за изделием.



Материалы.

Материал верха — оксфорд (100% пэ). Материал подкладки — неопрен.(100% пэ, синтетический каучук.)

Страна производитель: Россия.

Производитель.

ООО «ВЕДА-МОДА».

Юридический адрес: Московская обл., г. Протвино, ул. Заводской проезд, д. 22.

Тел. 8(4967)31-14-26

e-mail: moda@vedaved.ru

Продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

ИНСТРУКЦИЯ

Задняя поддержка для собак малых, средних и крупных пород.

Описание.

Поддержка задняя для тазовых конечностей предназначена:

- для восстановления двигательной активности в реабилитационный период животных, перенёсших травму позвоночника;
- при парезах и параличах конечностей;
- при спондилезах и остеохондрозах;
- при патологиях суставного аппарата;
- при возрастных проблемах;
- поддержка крестцового отдела позвоночника и задних конечностей животного в физиологически правильном положении;
- для помощи владельцу при выполнении таких манипуляций с животным, как поддержка, прогулка, посадка в автомобиль и т.д.

Рекомендовано к использованию животным перенёсшим ампутацию конечности.

Ускоряет реабилитацию, обеспечивает возможность прогулки.

Благодаря двум ручкам и особой конструкции, нагрузка при использовании поддержки распределяется равномерно, что обеспечивает минимальную патологическую подвижность в пояснично-крестцовом отделе позвоночника.

Поддержка состоит из двух основных частей: верхней детали крестцового отдела и нижней детали живота, соединяющихся между собой регулируемыми застёжками «фастекс».

В комплект входит длинная ручка-ремень с креплением на четыре точки опоры, для поддержания животного. Верхняя деталь поддержки снабжена короткой ручкой для помощи животному при движении. На верхних и нижних деталях изделия имеется маркировка («хвост») для определения правильного положения на теле животного.

Размеры.

Определяются по весу и обхватам животного.

- Р-р **1.** 10-25 кг. Обхват талии 44 — 56 см,
- р-р **2.** 20-35 кг. Обхват талии 60 — 72 см,
- р-р **3.** 30-45 кг. Обхват талии 66 — 78 см,
- р-р **4.** 40-55 кг. Обхват талии 70 — 82 см,
- р-р **5.** 50+ кг. Обхват талии 72 — 86 см.

Подготовка к применению.

Для того, чтобы поддержка полностью выполняла свои функции, перед применением необходимо обеспечить правильную посадку изделия на теле животного.

Для этого необходимо:

- Надеть поддержку на собаку.
- Плотно затянуть регулирующие ремни.
- Симметрично распределить регулировку ремнями относительно правой и левой стороны изделия. При положении на животном расстояние между деталями спинки и живота должно быть одинаковым относительно линии позвоночника.

Поддержка должна плотно сидеть на животном, но при этом не сдавливать живот.

Для предотвращения самопроизвольного расстегивания защёлки «фастекс» необходимо убедиться, что при соединении деталей фастекса произошел щелчок.

Как правильно надевать и снимать поддержку.

Надевать:

- Соединить фастексами верхние детали крестцового отдела (с широкой стороны) с нижней деталью живота в районе талии с правой (или левой) стороны.

- Наложить изделие на животное.
- Соединить симметричные фастексы с левой (или правой) стороны.
- Соединить фастексы, находящиеся в районе хвоста животного (на деталях имеется бирка с соответствующим обозначением), проведя по животу между задними лапами соответствующие части нижней детали (более длинные и узкие, образующие V).
- **Проверить посадку изделия на животном.**
- При необходимости пристегнуть вспомогательный ремень карабинами к детали спинки за полукольца, расположенные около фастексов.

Снимать:

- Прodelать вышеперечисленные действия в обратном порядке.

В комплекте:

1. верхняя деталь крестцового отдела,
2. нижняя деталь живота,
3. ремень для поддержания крестцового отдела (на четыре точки опоры),
4. инструкция по применению.

Уход за изделием.



Материалы.

Материал верха — оксфорд (100% пэ). Материал подкладки — неопрен. (100% пэ, синтетический каучук.)

Страна производитель: Россия.

Производитель.

ООО «ВЕДА-МОДА».

Юридический адрес: Московская обл., г. Протвино, ул. Заводской проезд, д. 22.

Тел. 8(4967)31-14-26

e-mail: moda@vedaved.ru

Продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия.